



LADR Der Laborverbund Dr. Kramer & Kollegen


## Corona-Test: Anleitung zur Probenentnahme

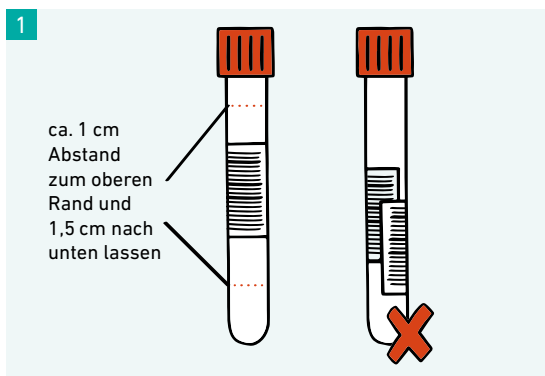

**1.** Der Barcode muss **senkrecht entlang des Röhrchens** geklebt werden. Die Laborgeräte können die Barcodes sonst nicht lesen.

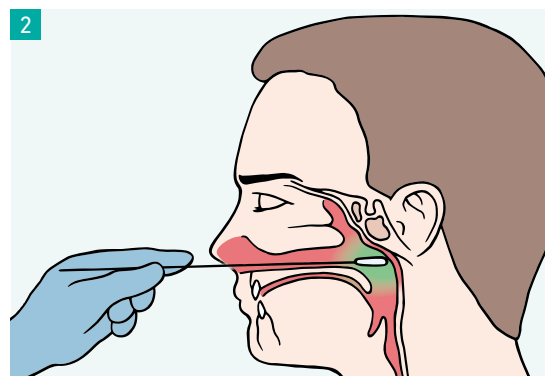

**2.** Direkt vor der Abnahme das Transportmedium öffnen und bereit halten. Den Tupfer der Schutzhülle entnehmen, den Nasen-/Rachenabstrich durchführen.

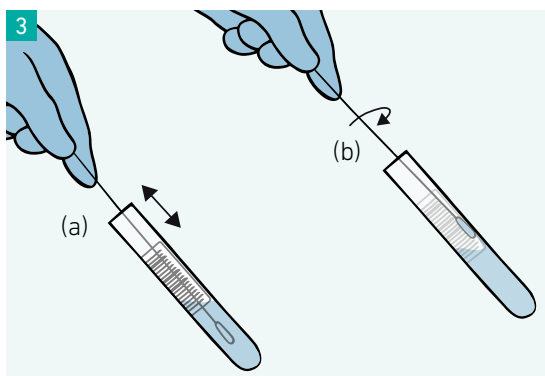

**3.** Den Abstrich in das Transportmedium einrühren. Bewegen Sie den Tupfer vorsichtig 10–15x in der Flüssigkeit des Röhrchens auf und ab (3 a). Achten Sie – zu Ihrem eigenen Schutz – darauf, dass die Flüssigkeit beim Einrühren nicht spritzt. Streichen Sie die Flüssigkeit am Tupfer mit einer Drehbewegung an der Innenwand des Röhrchens aus (3 b).



**4.** Den Rand und die Außenseite des Röhrchens nicht mit dem Tupfer berühren. Nach dem Einrühren schließen Sie das Röhrchchen wieder mit dem Deckel. Den Tupfer verworfen.