

PolyMem®

PolyMem – Wundverbände für Finger und Zehen

- für eine schnellere Genesung nach Verletzungen -



PolyMem® - Wundverbände für Finger und Zehen











Lassen sich bequem auf Finger oder Zeh rollen – so, wie sie aus der Packung kommen.

PolyMem-Wundverbände für Finger und Zehen helfen, Ödeme, Ergüsse, Entzündungen und Schmerzen bei offenen und geschlossenen Verletzungen zu reduzieren. Bei offenen Wunden reinigt, füllt, absorbiert und befeuchtet der Verband kontinuierlich die Wunde. Das Verbandmaterial hilft während des gesamten Heilprozesses sowohl anhaltende als auch behandlungsbezogene Schmerzen im Zusammenhang mit der Verletzung zu lindern.

Erste Wahl für die Behandlung von:

- Verstauchungen
- Zerrungen
- Prellungen
- Schürfwunden
- Fleischwunden
- Verbrennungen
- Geschwüren
- Matrixektomien




Art-Nr	Bezeichnung	Größe	Wundkissen	Verpackung	PZN
 1401	Finger/Zeh Silber	Größe 1	XS	5 x 6 St./VE	09221990
 1402	Finger/Zeh Silber	Größe 2	S	5 x 6 St./VE	09222009
 1403	Finger/Zeh Silber	Größe 3	M	5 x 6 St./VE	09222015
 1404	Finger/Zeh Silber	Größe 4	L	5 x 6 St./VE	10143930
 1405	Finger/Zeh Silber	Größe 5	XL	5 x 6 St./VE	10143947
 4401	Finger/Zeh	Größe 1	XS	5 x 6 St./VE	09063752
 4402	Finger/Zeh	Größe 2	S	5 x 6 St./VE	09063775
 4403	Finger/Zeh	Größe 3	M	5 x 6 St./VE	09063781
 4404	Finger/Zeh	Größe 4	L	5 x 6 St./VE	10143887
 4405	Finger/Zeh	Größe 5	XL	5 x 6 St./VE	10143918



1 Stellen Sie fest, wie lang der Verband sein muss. Schneiden Sie den überschüssigen Teil ab.



2 Entfernen Sie den Einsatz aus dem aufgerollten Ende und entsorgen Sie ihn.

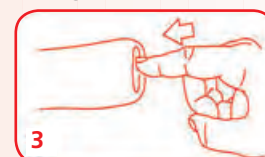

3 Stecken Sie den Finger in das aufgerollte Ende des Verbandes.



4 Drücken Sie den Finger in das Verbandmaterial und rollen Sie es ab.



5 Rollen Sie den Verband über den Finger.



6 Der Verband sollte fest auf Finger oder Zeh sitzen.

mediset
mediset clinical products GmbH

Spenglerallee 12-14, 04442 Zwenkau
Telefon: 034203-43 01 40, Fax: 034203-43 01 49
Industriestraße 26, 40822 Mettmann
Telefon: 02104-3 68 32, Fax: 02104-3 68 95
info@mediset.de, www.mediset.de

