



# Schnell-Desinfektionstücher

## Alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion



### Produktbeschreibung

**medichem Schnell-Desinfektionstücher** sind alkoholfreie, gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur schnellen Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und medizinischem Inventar. **medichem Schnell-Desinfektionstücher** ermöglichen insbesondere bei der Desinfektion und Reinigung von Ultraschallköpfen ohne Schleimhautkontakt eine praxisnahe und zeitsparende Anwendung. Sie sind alkoholfrei und enthalten weder Aldehyde noch Phenole. Die Tücher lassen sich einzeln aus der praktischen und wiederverschließbaren Spenderdose entnehmen.

### Anwendungsgebiete

*Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR):*  
Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem medizinischen Inventar und Flächen aller Art.

*Gem. EU-Medizinprodukteverordnung:*  
Schnelldesinfektion und Reinigung von nichtinvasiven Medizinprodukten, sowie Ultraschallsonden für abdominale Untersuchungen.

### Anwendung und Hinweise

Flächen mit **medichem Schnell-Desinfektionstücher** bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

Medizinprodukte, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit dem Körper in Kontakt kommen, nach Ablauf der Einwirkzeit 15 Sek. unter fließendem Wasser geeigneter Qualität spülen.

Haltbarkeit nach Anbruch der Packung: 3 Monate

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			30 Sek.	1 Min.	2 Min.
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid *	VAH **/ EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung		✓	
Behüllte Viren					
begrenzt viruzid	RKI/DW	inkl. HBV/HIV/HCV	✓		
	EN 14476	niedrige Belastung	✓		
Ergänzende Prüfergebnisse					
wirksam gegen Papova/SV40 - Viren	EN 14476	hohe Belastung			✓
wirksam gegen Rotaviren	RKI/DVV		✓		
Ergänzende Prüfergebnisse					
bakterizid	EN 1040			✓	
	EN 13727	hohe Belastung		✓	
levurozid (C. albicans)	EN 1275			✓	
	EN 13624	hohe Belastung		✓	

\* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

\*\* gelistet in der 5 Min.-Spalte der VAH-Liste



# Schnell-Desinfektionstücher

## Zusammensetzung

In 100 g Lösung sind enthalten:  
0,50 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid,  
0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid.

## Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gemäß nationaler Richtlinien.

Produktdaten	
Produkt	Art.-Nr.
Spenderdose 100 Tücher	MCHE930
Nachfüllbeutel 100 Tücher	MCHE931

[www.medichem-online.de](http://www.medichem-online.de)

Stand 02/2022  
Desinfektionsmittel sicher verwenden.  
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

CE0482

